



禽流感 H9 抗体金标检测卡

禽流感 H9 抗体快速检测卡使用说明书

【原理】

禽流感 H9 抗体检测卡以双抗原夹心法为基础, 采用免疫层析金标记技术, 快速检测禽流感 H₉ 抗体。

【试剂组成】

1. 禽流感 H9 抗体检测卡	20套/40套	2. 产品使用说明书	1份
3. 样品离心管	20个/40个	4. 一次性手套	4双/8双

【操作方法】


一、样品制备:

1. 采血0.5-1mL, 1000转/分, 离心3分钟静置分离血清。
2. 采集样品后必须立即进行检测, 若不能立即检测, 应冷藏保存, 超过24小时的, 应冷冻保存。

二、操作步骤:

1. 使用前将试剂盒和样品恢复至室温。
2. 取出检测卡, 开封后平放于桌面上, 用滴管缓慢而准确地逐滴加入3滴上清液。
3. 10分钟判断结果, 10分钟后的结果无效。

【结果判定】

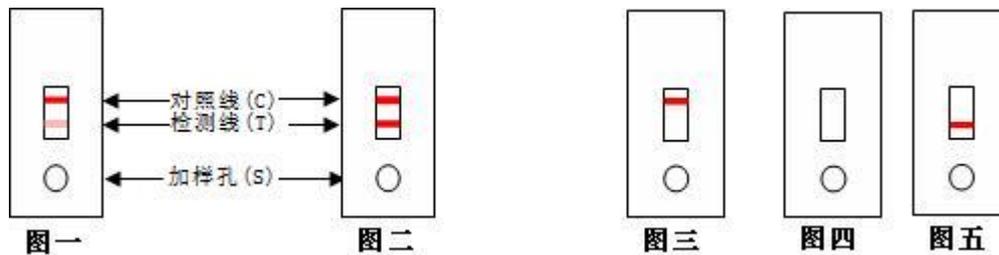

1. **阳性:** 在观察孔内, 若对照线显色, 检测线同时显色, 判为阳性 (如图一、图二)。
2. **阴性:** 在观察孔内, 若对照线显色, 而检测线不显色, 判为阴性 (如图三)。



广州健仑生物科技有限公司

电话: 020-82574011 手机 1: 13802429590 邮箱: Service@jianlun.com
传真: 020-28216107 手机 2: 13710007117 网址: www.jianlun.com

3. **无效:** 在观察孔内, 若对照线不显色, 则结果无效, 建议重新测试 (如图四、图五)。

【产品性能】

1. **精密性:** 同批次产品在相同样品浓度下测定, 反应结果一致, 显色均一。

【注意事项】

1. 本品如果购买时发现过期、破损、污染、无效的产品, 请在购买处进行更换。
2. 检测样品可能有潜在感染性, 样品和使用过的试剂应作为微生物危险品处理。
2. 所有检测卡启封后1小时内使用, 此前不要随意打开。
3. 本品为一次性产品, 请勿二次使用。

【储存及有效期】

保存于干燥阴凉处 (2~30℃), 有效期为18个月, 生产日期见包装。

- 【公司名称】 广州健仑生物科技有限公司
- 【联系电话】 13802525278 13710007117 020-82574011
- 【公司传真】 020-28216107
- 【电子邮件】 Service@jianlun.com
- 【腾讯 QQ】 712628580 712628581 712628582
- 【公司网址】 www.jianlun.com
- 【公司地址】 广州市天河区车陂第十五工业园一幢 4067 室